
MÉRYkék QKY Bluetooth adapter

Használati Útmutató

A MÉRYkék QKY Bluetooth adapter segítségével bármely MÉRYkék vércukormérő készülék Bluetooth kommunikációra képes.

Az adapter kizárólag MÉRYkék vércukormérő készülékekkel használható.

A MÉRYkék QKY Bluetooth adapter Bluetooth 4.0 (BT 4.0) adatkommunikációs szabványt használ ezért csak olyan Android készülékekkel használható, amely Bluetooth 4.0 szabványú adatkommunikációra képes.

A MÉRYkék QKY Bluetooth adapter használatához Android eszközre telepített MÉRYkék alkalmazásra van szükség, valamint az Android eszközön aktív internet kapcsolatra.

A MÉRYkék alkalmazás díjmentesen a Google Play áruházból tölthető le a következő hivatkozásról:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dicare.merykek2>

MÉRYkék QKY Bluetooth adapter használata:

1. A védőkupak levétele után csatlakoztassa az adaptert QKY felirattal felfele MÉRYkék vércukormérő készülék tesztcsík csatlakozójába (MÉRYkék tesztcsík helyett az adapter csatlakoztassa a készülékbe).
2. A csatlakoztatást követően a vércukormérő készülék automatikusan bekapcsolódik, kijelzőjén PC felirat jelenik meg.
3. A MÉRYkék QKY Bluetooth adapteren egy kék villogó jelzés jelenik meg, amely villogás 20 másodpercet követően a készülék automatikus kikapcsolódását követően megszűnik.
4. Indítsa el Android eszközére telepített MÉRYkék alkalmazást a villogó kék jelzés ideje alatt. Az Bluetooth kapcsolat felépítéséhez engedélyezni szükséges Android eszközén a Bluetooth kommunikációt, amely bekapcsolását a MÉRYkék alkalmazás automatikusan elvégzi. Az adatkapcsolat létrejöttét a MÉRYkék QKY Bluetooth adapteren megjelenő folyamatosan világító kék fény jelzi.
Amennyiben nem épül fel az adatkapcsolat és a vércukorszintmérő automatikusan kikapcsol, húzza ki az adaptert a MÉRYkék vércukormérő készülékből, majd 2 másodperc várakozás után csatlakoztassa ismét, ez idő alatt ne állítsa le a már futó MÉRYkék alkalmazást Android eszközén.
5. A MÉRYkék alkalmazás Bluetooth kapcsolódást követően letölti a MÉRYkék QKY Bluetooth adapter segítségével a MÉRYkék vércukorszintmérőn található mérési adatokat és aktív internet kapcsolat esetén internetes adatbázisba (vércukor mérési adatbankba) tölti fel a mérési adatokat. A feltöltést követően a MÉRYkék alkalmazás

táblázatos formában megjeleníti a letöltött mérési adatokat, illetve lehetőséget biztosít a cukorbetegvagyok.hu weboldalra történő regisztrációra.

A MÉRYkék QKY Bluetooth adapter nem kell Bluetooth párosítania Android eszközével, a MÉRYkék Android alkalmazás indításakor az aktuálisan elérhető MÉRYkék QKY Bluetooth adaptert automatikusan párosítja.

A cukorbetegvagyok.hu weboldalon mérési adatait vércukornapló formátumban kinyomtathatja, mérési értékeihez megjegyzéseket írhat, illetve utólagosan beállíthat mérési értékekhez tartozó mérési módot (normál / étkezés előtt / étkezés után), ha több MÉRY, vagy MÉRYkék vércukormérő készülékkel rendelkezik a készülékekkel végzett mérési adatait egy felületen megjelenítheti.

Bővebb információt a cukorbetegvagyok.hu weboldal használatáról a cukorbetegvagyok.hu weboldalon olvashat.



Di-Care Zrt.
Utolsó módosítás: 2021.04.14